

사용방법  
click

감각성 우위안  
검사 방법 확인

# 원터치 피팅 멀티포컬용 사용방법

1/3

# 원터치 피팅 멀티포컬용 입력 방법

사용방법  
click

감각성 우위안  
검사 방법 확인

## 1단계

1. 안경도수(완전교정도수) 또는 멀티포컬 렌즈 도수 선택후 도수 입력
2. 가입도 선택
3. 감각성 우위안 선택

## 2단계

계산 클릭

## 3단계

멀티포컬렌즈 추천 도수 확인 가능

2차 보정이 필요한 경우 클릭

# 원터치 피팅 멀티포컬용 보정 방법

사용방법  
click

감각성 우위안  
검사 방법 확인



**1단계**  
2차 보정을 원할 경우,  
**‘시력향상이 필요하다면’** 을 클릭

**2단계**  
원거리, 근거리 중 보정이 필요한  
도수 확인 가능

사용방법  
click

감각성 우위안  
검사 방법 확인

# 감각성 우위안 검사

1/2

## 감각성 우위안 검사 방법

1. 최대 구면 도수 장용 후, 양안 개방
2. 최고 시력 또는 한 줄 아래 시표 (원거리) 사용
3. +1.00 또는 +1.50 도수를 사용하여 한 쪽 눈씩 번갈아가며 장용
4. 장용 시, 더 흐림을 느끼는 눈이 **“감각성 우위안”**

- \* 양안 시력이 동일한 경우, 위 방법 활용
- \* 양안 시력이 다를 경우, 원거리 시력이 좋은 눈을 **“감각성 우위안”**으로 선정

